


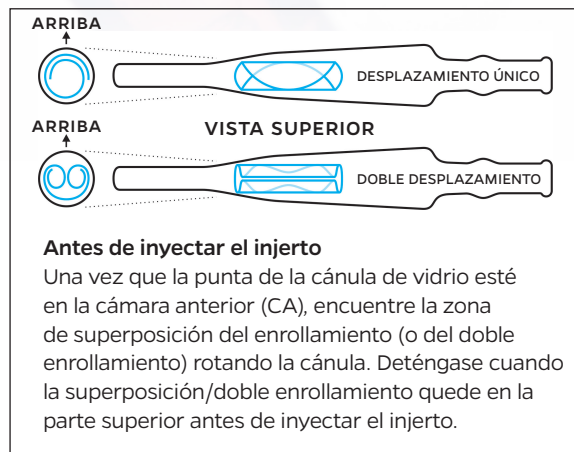

CONSEJOS DE LOS EXPERTOS:

**Momento del intercambio de fluidos**

Si se desea el intercambio de fluidos, cambie cuidadosamente el medio de conservación corneal por BSS justo antes de la administración.

TransplantREADY® DMEK

Precargado en una cánula de vidrio Weiss


Cada tejido de donante se prepara según sus especificaciones y se precarga en una cánula de vidrio Weiss*. Este sistema de administración completamente ensamblado se conecta fácilmente a una jeringa con conexión Luer-Lock.

Diseño Quick Connect: el sistema preensamblado incluye:

- Conexión Luer-Lock con tapa terminal (end-cap)
- Tubo de 14 French (14 Fr)
- Cánula de vidrio Weiss
- Esponja permeable que asegura el injerto
- Punta protectora de silicona que aísla el extremo de la cánula de vidrio para mayor seguridad**

Almacenamiento y manipulación

- Medio de conservación corneal aprobado por la FDA
- Conservar entre 2 °C y 8 °C; ¡no congelar!
- **1-2 horas antes de la cirugía:**
Retire el vial que contiene el sistema de administración preensamblado del contenedor de envío y permita que el vial sellado alcance la temperatura ambiente.
- Prepare una jeringa de 3 ml con 2.5 ml de BSS (no incluido).
- Pida al asistente que retire la tapa blanca no estéril y sostenga firmemente el vial de vidrio.

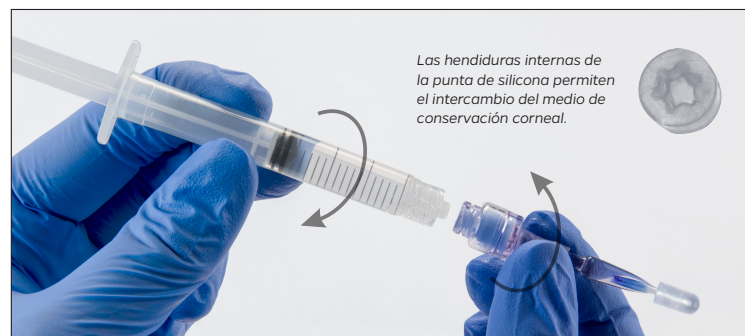**Instrucciones de uso**

1. **Retire el sistema de administración TransplantREADY® DMEK del vial.**
2. **Conéctelo a la jeringa.**
Asegúrese de que no haya burbujas de aire en la jeringa; presione lentamente el conector de la tapa terminal (end-cap) y la jeringa con conexión Luer-Lock para unirlos, luego gire para asegurar y verifique las conexiones.
3. **Retire la punta de silicona.**
Mientras la punta de silicona y la esponja estén sumergidas en BSS, retire la punta y la esponja antes de la inserción.

Opcional: Reemplazar el medio de conservación corneal por BSS

Sumerja la cánula de vidrio Weiss con la punta de silicona colocada, mientras introduzca el BSS lenta y cuidadosamente a través del dispositivo de administración. Las hendiduras internas de la punta de silicona permiten el intercambio del medio de conservación corneal.

Durante el lavado, supervise la posición del injerto. Si el injerto se aproxima a la punta, reposiciónelo hacia el centro de la cánula de vidrio Weiss aspirando suavemente el líquido y luego reanude el lavado.

*La cánula de vidrio Weiss es un dispositivo médico de Clase 1, código de producto HMX, fabricado por Gunther Weiss Scientific Glassblowing, Inc., un fabricante de dispositivos médicos registrado ante la FDA - Registro del establecimiento n.º 3005489143.

**La punta protectora de silicona y la esponja aseguran el injerto durante el envío y durante el intercambio del conservante corneal por BSS.



LIONS
WORLD VISION
INSTITUTE™

So the world can see.

1410 N 21st Street, Tampa, FL 33605-5313 | 813.289.1200 | LWVI.org