



TransplantREADY® DMEK

Precargado en una
cánula de vidrio Weiss*

“Contar con el sistema **TransplantREADY** para DMEK y DSAEK aporta consistencia y mejora la eficiencia en el quirófano, a la vez que ofrece excelentes resultados posoperatorios.”

—Joaquín De Rojas, M.D.
Director de Córnea y Enfermedades de la
Superficie Ocular Cirujano de Catarata,
Refractiva y Córnea Center For Sight, Sarasota, FL

Más de 10 años de experiencia
precargando córneas

- TransplantREADY para facilitar su uso
- Dispositivo de administración más solicitado para DMEK
- El diámetro más pequeño disponible



LIONS
WORLD VISION
INSTITUTE™

Para que el mundo pueda ver.

TransplantREADY® DMEK

Precargado en una cánula de vidrio Weiss*

El sistema preensamblado incluye:

- Conexión Luer Lock con tapa terminal
- Tubo de 14 French
- Cánula de vidrio Weiss, 1.6 mm de diámetro exterior
- Esponja permeable que asegura el injerto
- Punta protectora de silicona que aísla el extremo de la cánula de vidrio para mayor seguridad****

TransplantREADY®

El objetivo de TransplantREADY DMEK en una cánula de vidrio Weiss es facilitar los procedimientos de trasplante mediante injertos preparados y precargados, preservando las células endoteliales.

- Preparado y precargado para una administración sin contacto
- Menos traumático para el endotelio
- Elimina la necesidad de trépano del donante y fórceps

Preparación

Cada injerto TransplantREADY DMEK se prepara mediante nuestra técnica de hidrodisección “Blister”, que disecciona y tiñe simultáneamente la membrana de Descemet. El injerto se trepana previamente al diámetro deseado, se premarca con un sello “S” o con marcas periféricas “I-II” y se precarga en la cánula de vidrio Weiss. Las células endoteliales se preservan al limitar la manipulación del tejido y la exposición del endotelio al Azul de Tripano. Los beneficios documentados incluyen una pérdida de células endoteliales 10 veces menor en comparación con la disección y tinción mediante SCUBA.

Almacenamiento y transporte

- Los injertos precargados se almacenan verticalmente en un vial con conservante corneal aprobado por la FDA
- La orientación del injerto es visible dentro de la cánula de vidrio

Consejos, videos e información

Para obtener la información más reciente, incluidos videos quirúrgicos, comentarios de cirujanos y mejores prácticas, visite: LWVI.org.

Solicite TransplantREADY DMEK precargado en una cánula de vidrio Weiss.

*La cánula de vidrio Weiss es un dispositivo médico de Clase 1, código de producto HMX, fabricado por Gunther Weiss Scientific Glassblowing, Inc., fabricante de dispositivos médicos registrado ante la FDA - Registro de establecimiento #3005489413

**La punta protectora de silicona y la esponja aseguran el injerto durante el transporte y durante el intercambio del conservante corneal por BSS.



CONSEJOS DE LOS EXPERTOS:

UP
↑
ARRIBA

ROLLO SIMPLE

UP
↑
ARRIBA

ARRIBA VISTA SUPERIOR

DOBLE ROLLO

Antes de inyectar
Una vez que la punta de la cánula de vidrio esté en la cámara anterior, localice la superposición del rollo (o el doble rollo) girando la cánula. Deténgase cuando la superposición/doble rollo quede arriba antes de inyectar el injerto.

Momento para el intercambio de fluido

Si se desea el intercambio de fluido, cambie cuidadosamente el conservante corneal por BSS justo antes de la administración.



Para que el mundo pueda ver.

1410 N 21st Street, Tampa, FL 33605-5313 | 813.289.1200 | LWVI.org

v.09.14.2026